


# Oppervlakkige huidschade door mondkmaskers

## Richtlijnen voor zelfzorg

Uw zorgverlener heeft u Flamigel® geadviseerd om oppervlakkige wondjes, veroorzaakt door het dragen van een mondkmasker, te behandelen. Volg deze richtlijnen en lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

### Zo gebruikt u Flamigel®

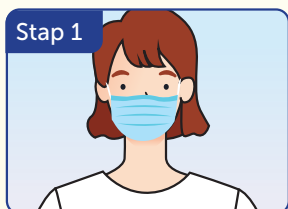

Was en droog uw handen vóór gebruik.



Breng voorzichtig een dun laagje Flamigel® aan op de getroffen huidzone. Niet inwrijven.



Zet uw masker weer op wanneer Flamigel® geabsorbeerd is.

### Flamigel is veilig voor regelmatig en continu gebruik

#### Voordelen:

Flamigel® is een hydroactieve colloïdale gel voor de behandeling van lichte wonden. Flamigel® helpt de huid snel te helen door een optimaal vochtig milieu te creëren.

- Verkoelt en kalmeert de huid
- Niet kleverig of vettig
- Geneest wonden tot **40 % sneller**
- Vormt een **beschermende huidbarrière**
- Zonder parfum

#### Contra-indicaties:

Niet gebruiken als u allergisch bent voor één van de bestanddelen.  
Niet aanbrengen op de oogleden of in het oog. Bij contact met de ogen: de ogen grondig spoelen.

**Flamigel®**  
www.flamigel.be



Flamigel® is verkrijgbaar in tubes van 50 g, 100 g en 250 g

Hebt u vragen over het gebruik van Flamigel®? Neem dan contact op met [medical@flenhealth.com](mailto:medical@flenhealth.com). U vindt ook meer informatie op [www.flenhealth.com](http://www.flenhealth.com) of [www.flamigel.be](http://www.flamigel.be). Hebt u vragen over uw oppervlakkige verwondingen? Neem voor advies contact op met uw verpleegkundige, arts of apotheker.